

# La unión perfecta para superficies delicadas

## FD 366 Sensitive Desinfección rápida de superficies



## FD 360 Limpieza de imitación de cuero

Nuestro FD 366 Sensitive está especialmente indicado para la desinfección rápida, efectiva y cuidadosa entre tratamientos de todas las superficies de plástico, vidrio acrílico, cueros sintéticos y vinilos. Este producto garantiza una completa desinfección a la vez que protege las superficies más delicadas evitando el deterioro de los materiales de las unidades de tratamiento, aparatos, instrumentos y otros objetos del mobiliario.

1. Después de cada tratamiento, desinfectar las superficies y objetos contaminados.
2. Aplicar FD 366 Sensitive sin diluir en un paño.
3. Limpiar todas las superficies y objetos contaminados.
4. No aclarar.
5. Dejar actuar el producto en la superficie.
6. Dejar secar superficies y objetos.

Utilice FD 360 para la limpieza y cuidado de las tapicerías vinílicas y de cuero sintético de sus sillones dentales, sillas y taburetes. Este producto garantiza una limpieza profunda eliminando todo tipo de manchas a la vez que hidrata y protege para evitar cuarteamientos y roturas de las superficies sintéticas y vinílicas. Gracias a sus aceites naturales de aguacate y la aplicación mediante una esponja natural, se consigue una limpieza total con un acabado hidratado, brillante y sedoso.

1. Aplicar FD 360 cuando la superficie esté sucia o reseca.
2. Rociar FD 360 sin diluir en la esponja natural especial.
3. Frotar la esponja natural impregnada con el producto en la superficie a tratar.
4. A continuación, eliminar el exceso de FD 360 usando un paño seco. Repetir el paso 3 en caso de manchas persistentes.

# Un team forte per superfici delicate

## FD 366 sensitive Disinfezione ad azione rapida



## FD 360 Pulizia dell'ecopelle

Con FD 366 sensitive potrete disinfettare le superfici delicate come plastica, vetro acrilico o ecopelle in modo rapido, efficace e particolarmente gentile. Questo vi consentirà di proteggere nel tempo il valore di riuniti, device, monitor, strumenti e molti altri arredi.

1. Dopo ogni trattamento, disinfettare le superfici e gli oggetti a rischio contaminazione.
2. Applicare FD 366 sensitive non diluito su un panno o usare le salviette FD 366 sensitive top wipes e pulire.
3. Inumidire completamente la superficie e gli oggetti da disinfettare.
4. Disinfettare nuovamente le superfici pulite.
5. Lasciare agire il prodotto.
6. Lasciar asciugare superfici e oggetti.

Con FD 360 potrete pulire delicatamente e proteggere dall'usura i riuniti in ecopelle. Il detergente assicura una pulizia profonda e, con pochi millilitri alla settimana, dona nuova lucentezza alle superfici. Grazie a FD 360 manterrete intatto nel tempo il valore dei vostri riuniti.

1. Applicare FD 360 in base alle necessità.
2. Spruzzare il pulente non diluito sulla superficie, sulla spugna speciale o sul panno in microfibra.
3. Per una pulizia intensiva, ancora più efficace e profonda, usare FD 360 con la spugna speciale o il panno in microfibra FD.
4. Asciugare FD 360 in eccesso con un panno asciutto.